


Vergenix™ STR Collageen buffer

+

Xerthra™ PRP




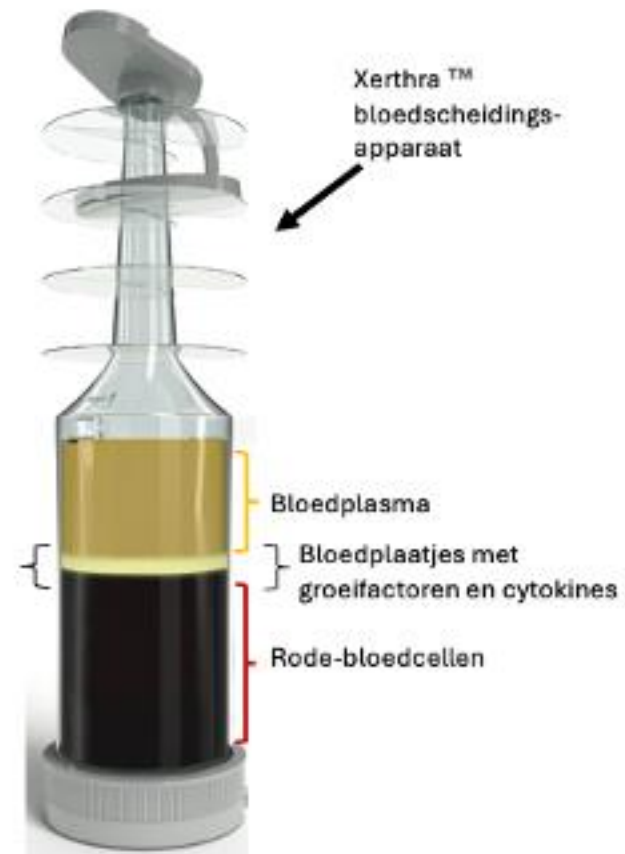

- 1,5 ml anticoagulant in spuit
- 15 ml bloed afnemen



- Wegen van bloed en bloedscheidingsapparaat
- Counterballans op gewicht brengen met water.

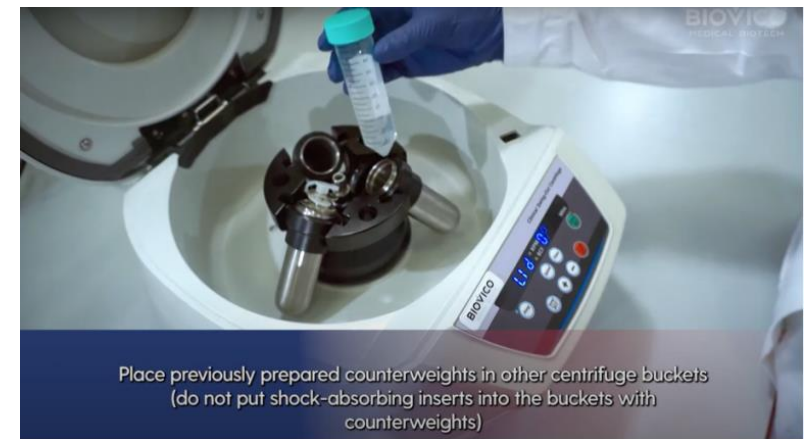

- Centrifugeren
- 5 min
- 1700\*g (RCF)



- Onderste plastic ring vervangen met buffy controler
- Draaien tot rode bloedcellen onderste ring bereiken
- Bloedplasma verwijderen met 20 ml spuit



- 3 ml spuitje plaatsen
- Controler draaien tot de rode bloedcellen bovenste ring bereiken



- Klaar voor gebruik



### Vergenix STR verpakking

- 5 cc spuitje voor PRP
- VeVergenix str gevuld spuitje
- Meng connector
- Naald



- Connect het PRP spuit met de Luer-lock connector en connect de Vergenix STR spuit
- Meng Vergenix STR met PRP door een keer over te spuiten
- Tik de spuit gevuld met de verkregen matrix ongeveer 20 keer tegen je handpalm
- Zorg dat beide spuitjes goed bevestigd zijn aan de connector en spuit de inhoud heen en weer tussen de twee spuiten, 20 keer.
- Tik opnieuw de spuit gevuld met de verkregen matrix ongeveer 20 keer tegen je handpalm
- Zorg dat beide spuitjes goed bevestigd zijn aan de connector en spuit de inhoud heen en weer tussen de twee spuiten, 20 keer.
- Wanneer de hele substantie een bleke oranje kleur heeft gekregen is het klaar voor gebruik.



Zorg er voor dat het mengsel van beide beide producten gemeng in 1 spuitje zitten en een bleke oranje kleur hebben. Klaar voor gebruik  
Gebruik een 19G naald vor de injectie  
Vooraf aan de injectie injecteer 1 ml Lidocaine of Marcaine tegen de pijn met een 25G naald



### Vergenix STR verpakking

- 5 cc spuitje voor PRP
- VeVergenix str gevuld spuitje
- Meng connector
- Naald



Luer-connector plaatsen aan PRP spuit van 5 ml



Vergenix spuit plaatsen aan Luer-connector



20 keer tikken op handpalm



20 keer op en neer spuiten



20 keer tikken op handpalm



Alles in een enkele 5 ml  
injectiespuit



19G-21G naald bevestigen en  
klaar voor injectie